

Roztwór do wykrywania antygenu **SARS-CoV-2**

► (Metoda immunofluorescencyjna) *


🕒 Pobranie wymazu



Wprowadzić sterylną wymazówkę do nozdrza, aż dotknie tylnej powierzchni nosogardzieli.




Obrócić wymazówkę kilka razy, pocierając nią o tylną powierzchnię nosogardzieli.

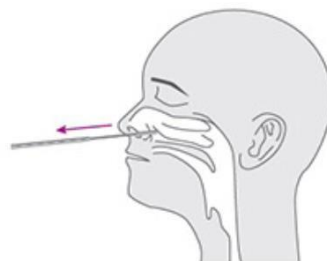

Wyjąć sterylną wymazówkę z jamy nosowej.

🕒 Analiza próbki: Wymywanie próbki za pomocą roztworu ekstrakcyjnego dołączonego do zestawu

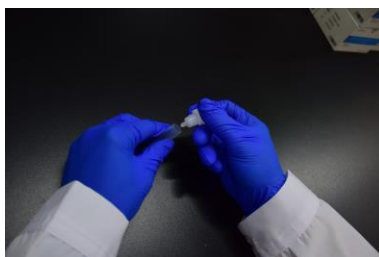

Dodać 0,5 mililitra (za pomocą pipety) lub 15 kropli (za pomocą kroplomierza) roztworu ekstrakcyjnego do próbki.

Próbki wymazów z nosogardzieli i gardła pozostają stabilne w roztworze ekstrakcyjnym przez 30 minut. Próbki powinny zostać poddane analizie niezwłocznie po przeprowadzeniu ich wymywania.

🕒 Nanoszenie próbki



Za pomocą pipety nanieść 0,1 ml próbki na kasetę testową.

🕒 Umieszczanie chipu ID




Umieścić chip ID w analizatorze i wcisnąć przycisk zatwierdź.

Procedura przeprowadzania testu

Tryb Szybki



- a) Nacisnąć menu *Quick Test* i wybierać rodzaj próbki.

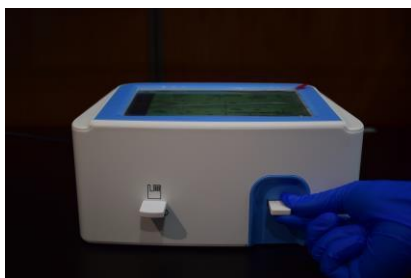

- b) Odczekać 10 minut.
c) Po 10 minutach umieścić kasetę testową w analizatorze i nacisnąć przycisk *Start Test*. Analizator automatycznie pokaże wynik testu i wydrukuje go.

Tryb Standardowy



- a) Nacisnąć menu *Standard* i wybrać rodzaj próbki.
b) Niezwłocznie po naniesieniu próbki na kasetę testową i umieścić ją w analizatorze (tak jak pokazano w sekcji *Quick test*).



- c) Nacisnąć przycisk *Start*. Analizator odliczy 10 minut, a po zakończeniu odliczania pokaże wynik testu na ekranie.



W przypadku obu trybów należy zapisać wynik i wyjąć kasetę testową z analizatora.

Aby przetestować kolejne próbki, należy powtórzyć powyższą procedurę (punkty b~c dla każdego z trybów).